

Návod na odběr a přepravu krve

1. Požádejte o odběr krve Vašeho veterináře.
2. Odeberte 0,5 – 1 ml plné krve do zkumavky s fialovým víčkem (EDTA antikoagulant). Zkumavku uzavřete a 10x otočte, aby se zabránilo sražení krve.
3. Popište zkumavku jménem psa a dobře zabalte (např. vložte zkumavku do plastového obalu nebo bublinkové fólie, aby se zabránilo rozbití při transportu).
4. Prosíme, vyplňte žádanku a tu se zkumavkou co nejdříve odešlete doporučeně do laboratoře.



Adresa laboratoře:

GenoCan s.r.o.
Křížíkova 70
612 00 Brno
Česká republika